


ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

SARSコロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット


# COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」

**【操作方法】** テストカセットや抽出バッファの入ったチューブは室内温度(15~30℃)に戻してからご使用ください。

## 検体の調製方法

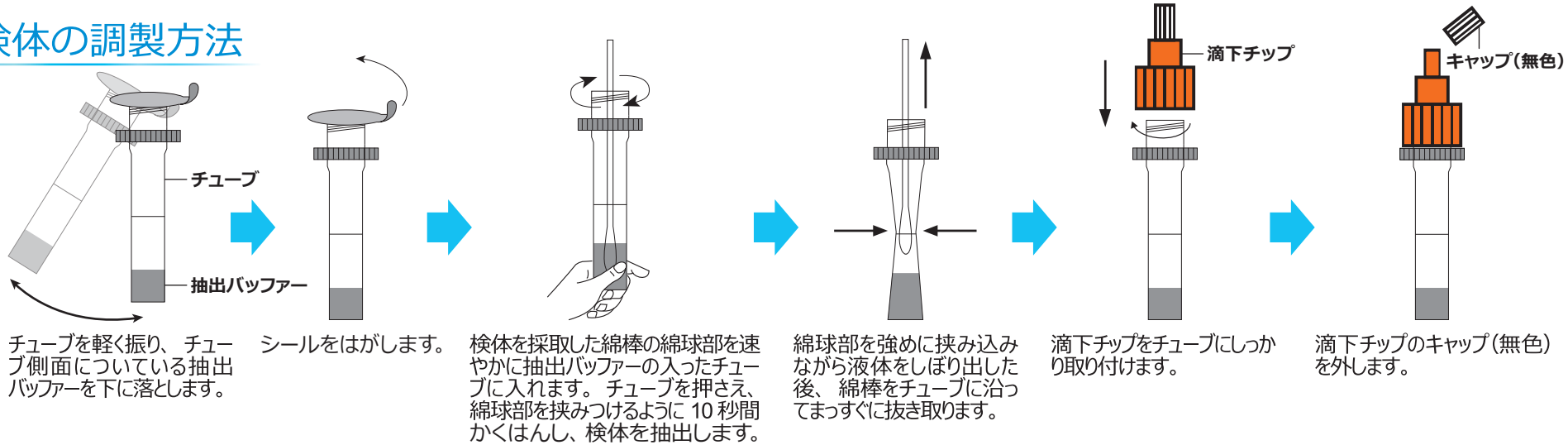


## 測定法

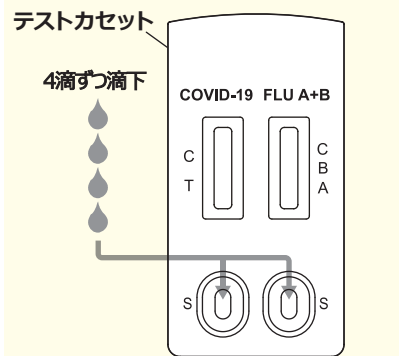

テストカセットの検体滴下部に検体抽出バッファを 4 滴ずつ、滴下部に触れないように垂直に滴下します。

## 判定方法 (判定時間15分)

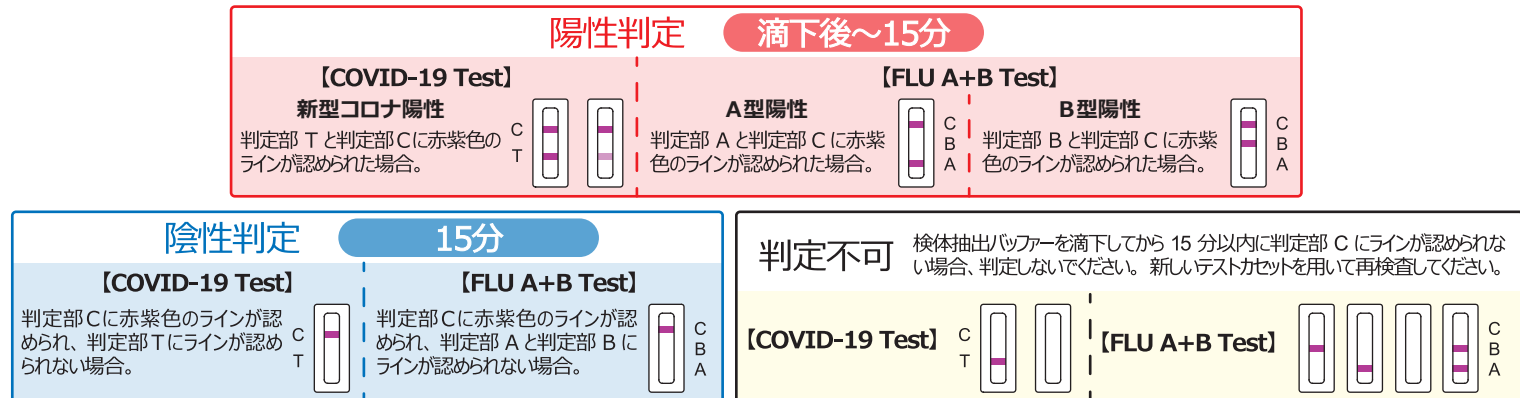

※判定部 C、T、B、A のラインの出現の有無を目視にて確認してください。詳細は、添付文書内の「測定結果の判定法」を参照してください。

# 【検体採取に関するご注意】

本キットを用いて検体を判定される場合には、**鼻の手前(鼻腔)**のぬぐい液を用いてください。

(採取方法は右ページ参照)

**\* 鼻の奥(鼻咽頭)まで綿棒を入れないようにご注意ください。**

## 《使用に際してのご注意》

### 1 はじめに

「**高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等重症化リスクの高い方や小学生以下の子ども**」以外の方が、**発熱等の感冒症状がある場合**にセルフチェックとして本キットを使用してください。

発熱等の症状がある高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等重症化リスクの高い方や小学生以下の子ども、又は重症化リスクが低い方であっても症状が重い方は、本検査キットの検査結果によらず、医療機関の受診を検討してください。

※ 陰性証明として使用することはできません。

### 2 使用にあたって

① **あらかじめ検査に関する注意点、使い方等を十分に確認してから**検査を実施してください。

② **鼻腔ぬぐい液を、自分で採取して**検査を行ってください。

### 3 新型コロナウイルス抗原陽性、インフルエンザウイルス抗原陽性、または両方陽性の場合

症状が軽い場合は、自宅等で療養を開始してください。

高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等重症化リスクの高い方や小学生以下の子ども、又は重症化リスクが低い方であっても症状が重いなど受診を希望される方は医療機関への連絡をご検討ください。

※ 陰性の判定が出たとしても偽陰性(感染しているのに陰性と判定されること)の可能性もあるので症状がある場合のマスク着用や、手洗い等の基本的な感染予防対策を継続してください。

※ 特にインフルエンザは、発病初期はウイルス量が少なくウイルス抗原を検出できない場合があることが知られています。

※ 発症からの経過時間によって判定結果が変わりうるため、症状が出てから本キットを使用するまでの時間と判定結果を記録し、医療機関へ受診の際は本キットの結果とあわせて医師に伝えてください。

#### 【参考】

新型コロナウイルスに関するお住まいの地域の受診・相談センターの連絡先



### 4 抗原検査キットの保管方法、廃棄方法

**保管**：常温(冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してから使用してください)

**廃棄**：ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をしてください。袋が破れた場合などは二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。

# 【検体採取方法】

## 鼻腔ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒を鼻の穴の入り口から2cm程度挿入し、内壁に沿わせてゆっくり5回転させる。そのまま5秒間静置し、綿棒を十分に湿らせてから抜き取ってください。鼻出血が起こりやすいので、鼻の穴の奥まで入れすぎたり、鼻の内壁に強くこすりつけすぎないようにご注意ください。

出典：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針\_第6版」の「2.検体の種類と採取」をもとに作成

製造販売元

**株式会社ニチレイバイオサイエンス**  
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

販売元

**Kowa 興和株式会社**  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

お問い合わせ先

興和株式会社 くすり相談センター  
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
電話 0120-508-514、03-3279-7587  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)